

OTICON | **Opn**

Guide rapide

Comment réappairer Oticon Opn™
avec des accessoires après la
mise à jour du micrologiciel



oticon
PEOPLE FIRST

Introduction

Après avoir effectué la mise à jour du micrologiciel Oticon Opn, il est nécessaire de réappairer vos aides auditives avec vos accessoires.

Ce guide rapide vous montre comment faire.



Rendez-vous sur le site oticon.fr/connectivity pour de plus amples informations sur la compatibilité, ou consultez la description de l'application Oticon ON sur App Store® et Google Play™.

Apple, le logo Apple, iPhone, iPad, iPod touch et Apple Watch sont des marques de commerce d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc. Android, Google Play et le logo Google Play sont des marques de commerce de Google Inc.

Sommaire

Télécommande 3.0	3
.....
Préparer la télécommande pour le réappairage	3
.....
Mettre les aides auditives en mode appairage	3
.....
Appairer la télécommande avec les aides auditives	4
.....
Adaptateur TV 3.0	5
.....
iPhone	6
.....
Supprimer « l'ancien appairage » de votre iPhone®	6
.....
Appairer les aides auditives avec votre iPhone	8
.....
Android™	10
.....
Supprimer « l'ancien appairage » de votre appareil Android	10
.....
Appairer les aides auditives avec votre appareil Android	12
.....
Notes	14
.....

Télécommande 3.0

1. Préparer la télécommande pour l'appairage




Appuyez sur tous les boutons et maintenez-les enfoncés pendant 5 secondes.

Le voyant d'état DEL clignote deux fois en vert.

Le voyant d'état DEL reste allumé en vert pendant environ 10 secondes pour confirmer que la télécommande est prête pour l'appairage.

2. Mettre les aides auditives en mode appairage

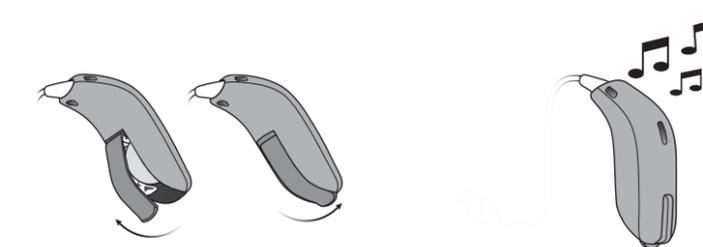


Assurez-vous que les piles adéquates sont insérées dans les aides auditives. Ouvrez les logements de piles des deux aides auditives. Attendez environ cinq secondes, puis refermez les logements de piles.


Attendez environ 10 secondes, jusqu'à ce que les aides auditives soient entièrement mises sous tension et que vous entendiez la petite musique de démarrage.

Les aides auditives restent en mode appairage pendant 3 minutes.


3. Appairer la télécommande avec les aides auditives

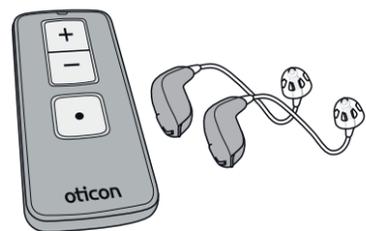

Placez les deux aides auditives à 20 centimètres de la télécommande.

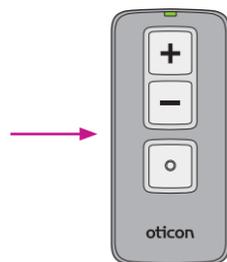


Appuyez brièvement sur n'importe quel bouton de la télécommande. Elle s'appairera automatiquement avec les aides auditives.

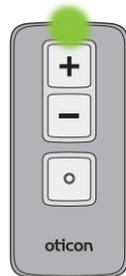

Une fois l'appairage terminé, le voyant d'état reste allumé en vert pendant environ 10 secondes.


1. Appairer l'adaptateur TV avec les aides auditives (inutile de supprimer les appairages précédents)

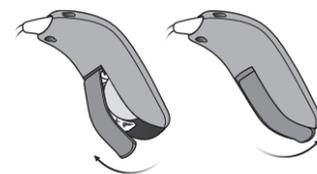

Assurez-vous que les piles adéquates sont insérées dans les aides auditives. Ouvrez les logements de piles des deux aides auditives. Attendez environ cinq secondes, puis refermez les logements de piles.



Attendez environ 10 secondes, jusqu'à ce que les aides auditives soient entièrement mises sous tension et que vous entendiez la petite musique de démarrage.

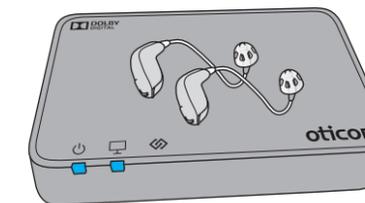


Placez les deux aides auditives près de ou sur l'adaptateur TV.


L'appairage est terminé une fois que le voyant de mise sous tension et le voyant TV s'allument en bleu pendant environ 30 secondes.

Adaptateur TV	Description
	Appairage terminé


1. Supprimer « l'ancien appairage » de votre iPhone

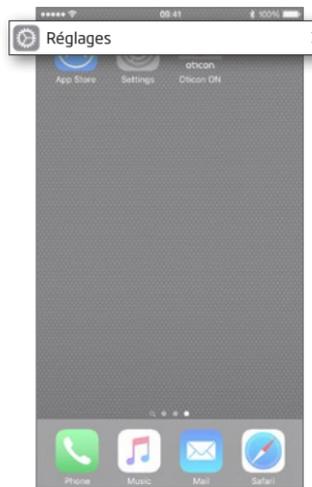


Accédez aux Réglages
Trouvez l'icône Réglages sur votre iPhone.

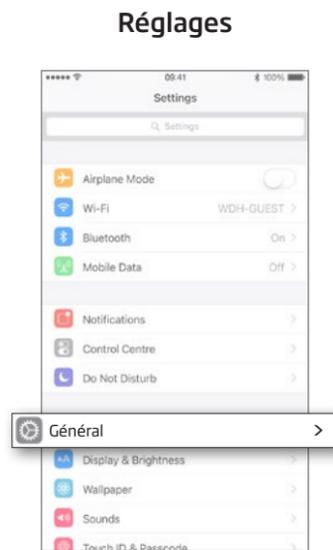


Sélectionnez Général

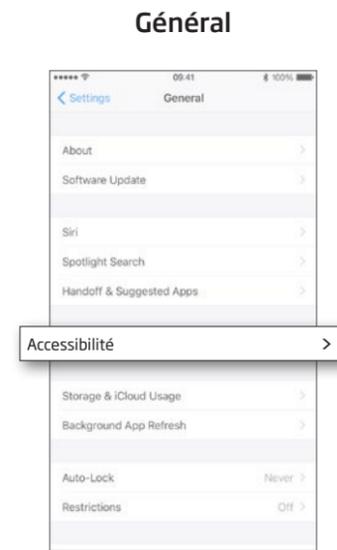


Sélectionnez Accessibilité

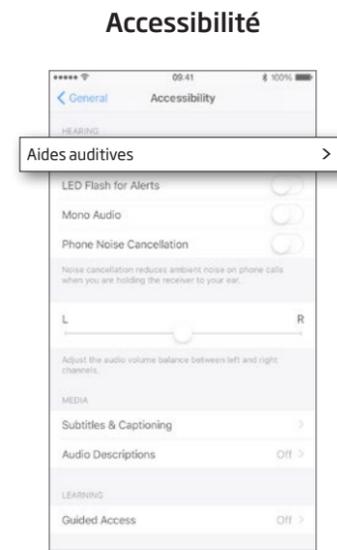

Sélectionnez Aides auditives

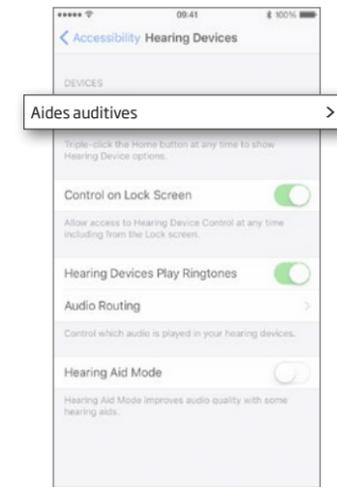

Sélectionnez les aides auditives
que vous souhaitez supprimer.

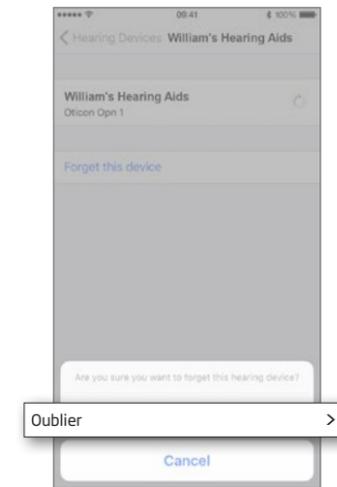

Sélectionnez Oublier




L'iPhone va maintenant
rechercher les nouvelles aides
auditives.



Désactivez le Bluetooth puis
réactivez-le avant de procéder de
nouveau à l'appairage.

2. Appairer les aides auditives avec votre iPhone

Réglages

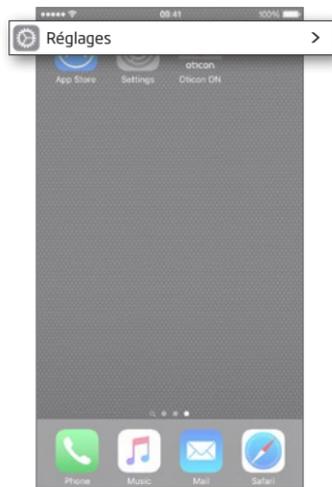


Accédez aux Réglages
Trouvez l'icône Réglages sur votre iPhone.

Sélectionnez Général




Général

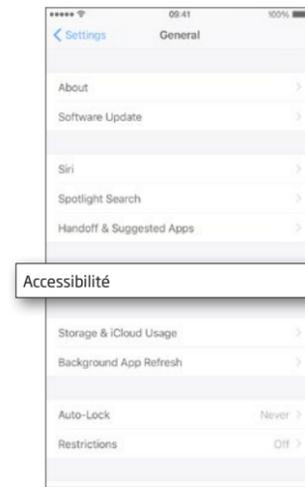


Sélectionnez Accessibilité


Accessibilité

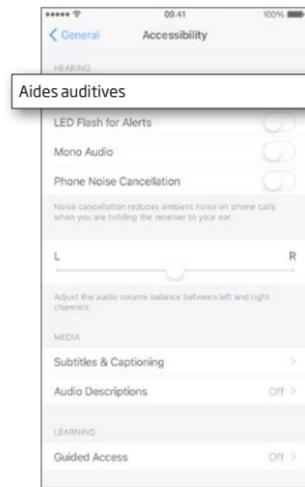

Sélectionnez Aides auditives

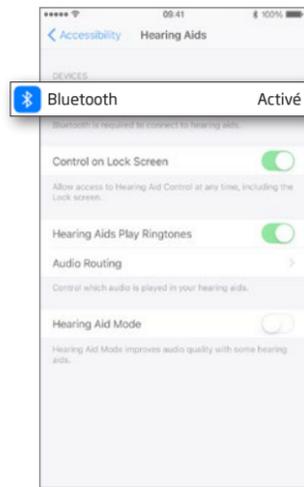

Assurez-vous que le Bluetooth est activé

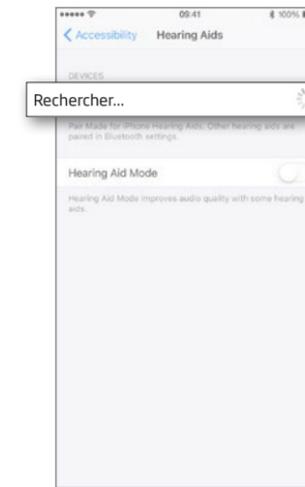


L'iPhone va maintenant rechercher les aides auditives.

Ouvrez puis refermez le logement de pile des appareils pour que l'iPhone puisse les reconnaître.



Sélectionnez les aides auditives lorsqu'elles deviennent disponibles.

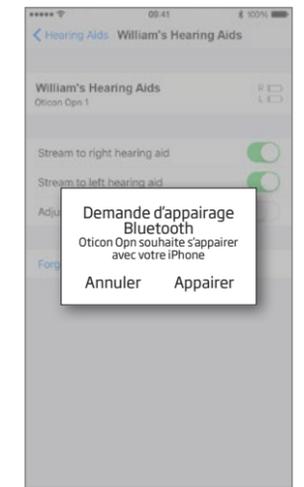


Confirmez la demande d'appairage Bluetooth : une demande d'appairage est nécessaire pour chaque aide auditive.

Appareil Android

W Version 1.0.9 de l'application

1. Supprimer « l'ancien appairage » de votre appareil Android

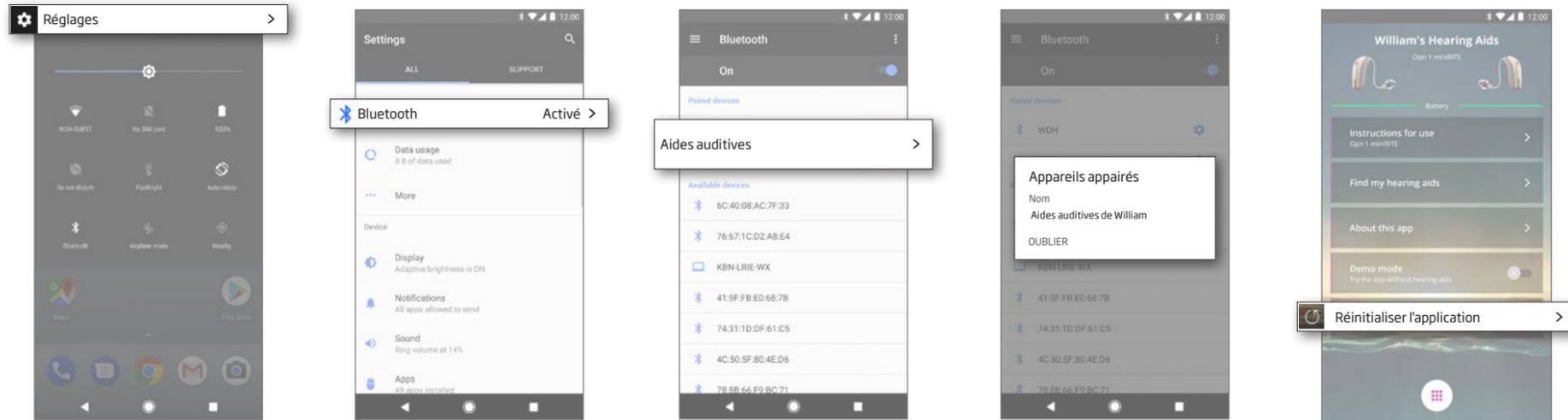

Accédez aux Réglages

Assurez-vous que le Bluetooth est activé


Sélectionnez Aides auditives

Sélectionnez Oublier

Réinitialisez l'application

W Version 1.0.10 de l'application et versions ultérieures

1. Supprimer « l'ancien appairage » de votre appareil Android

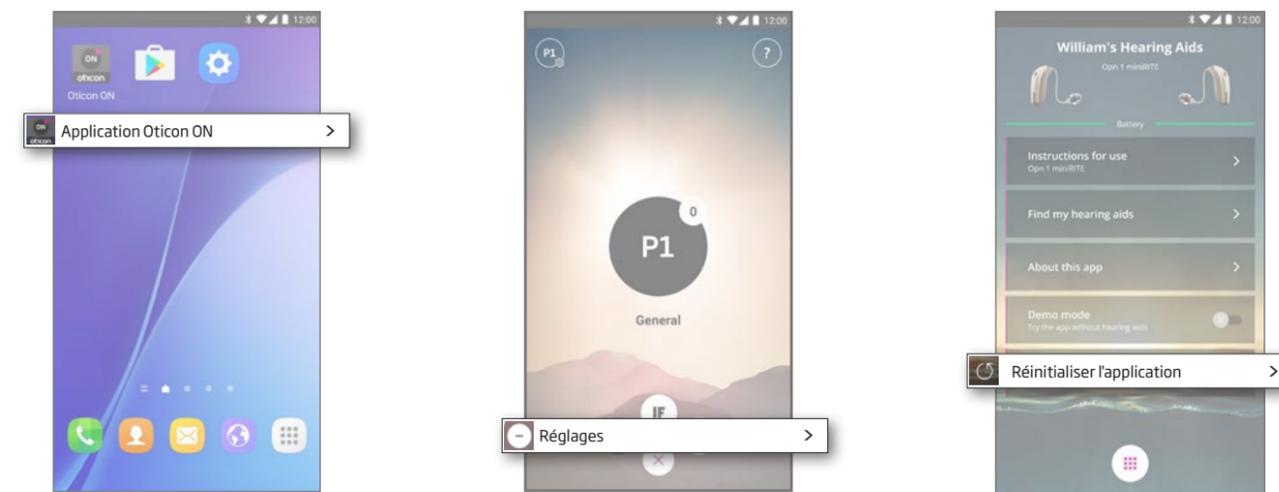

Démarrez l'application Oticon ON

Accédez aux Réglages
Appuyez sur l'icône Réglages pour accéder aux fonctions secondaires de l'application Oticon ON.

Réinitialisez l'application
La réinitialisation de l'application supprimera également l'ancien appairage.

2. Appairer les aides auditives avec votre appareil Android




Démarrez l'application Oticon ON



Autorisez l'accès aux informations de l'appareil
Lors du premier démarrage de l'application, autorisez l'accès à l'emplacement de l'appareil, afin de profiter au maximum des fonctionnalités.




Assurez-vous que le Bluetooth est activé
Si le Bluetooth est désactivé sur votre appareil, il vous montre automatiquement ce message. Appuyez sur « Activer le Bluetooth » et continuez.

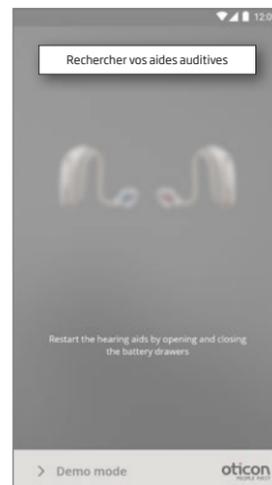

Rechercher vos aides auditives
Votre appareil se connecte à vos aides auditives lorsque vous démarrez l'application Oticon ON. Si votre appareil ne parvient pas à trouver vos aides auditives, redémarrez-les en ouvrant les logements de piles et en les refermant.



Connectez-vous à vos aides auditives
Sélectionnez vos aides auditives en appuyant sur le bouton « Appairer ». Si les aides auditives d'une autre personne apparaissent, essayez de nouveau de rechercher vos aides auditives.

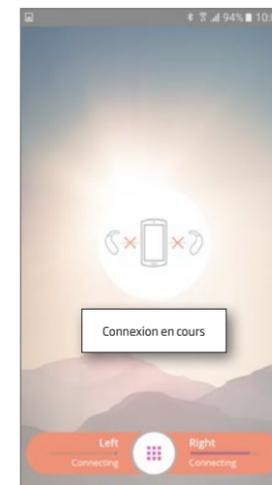

Attendez que l'application Oticon ON se connecte



Suivez le tutoriel rapide
Lors du premier démarrage, l'application vous présente un bref aperçu des diverses commandes.

Fabriqué par :
Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Denmark
www.oticon.global

**Fabricant et
distributeur local :**
Oticon Canada
1-6950 Creditview Rd.
Mississauga, ON L5N 0A6
www.oticon.ca

oticon
PEOPLE FIRST